

# NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SOUPRAVY

## ALKOHOL TEST

*Souprava slouží pro jednorázové orientační zjištění alkoholu ve vydechovaném vzduchu.*

### Postup zkoušky:

1. Odstranit obě zátky na trubičce.
2. Zasunout trubičku ALTIK do balonku a z druhé strany nasadit náustek.
3. Profouknout trubičku ALTIK jedním dechem v průběhu 20 až 40 sek. až do úplného naplnění balonku. Trubička se samovolně zahřeje.
4. Výsledek zkoušky vyhodnotit v rozmezí 1 až 2 minut



### Vyhodnocení:

- Zabarvení nejtmaších zrn v náplni porovnat s etalonem na trubičce.
- Intenzita zabarvení náplně je závislá na množství alkoholu v dechu.



### Upozornění:

- Každou trubičku lze použít pouze jednou.
- Bezprostředně po použití ústní vody, čištění zubů, pobytu v prostředí nasyceném parami alkoholu, po kouření, po požití likérových bonbónů a zákusků, ovocných šťáv a některých léků a přípravků obsahujících alkoholy je nutno se zkouškou vyčkat 15 min.
- Pro dosažení maximální přesnosti se doporučuje minimální teplota trubičky před zkouškou +10°C.
- Nerozebírejte trubičku. Při kontaktu s krystalickou náplní může dojít k zarudnutí kůže.
- Chraňte před dětmi.
- Použité trubičky ALTIK vyhoďte do běžného odpadu.
- Za nevhodné použití nebo nedodržení bezpečnostních opatření nenese výrobce nebo distributor žádnou odpovědnost.

### Skladování:

- Skladovat v původních obalech, na suchém místě do +35°C, bez prudkých výkyvů teplot. Chraňte před světlem.
- Doba spotřeby trubiček ALTIK je uvedena na obalu.